

## GARANTIE/ LAUFZEIT

Die Verkäufergarantie gilt 24 Monate und ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Sie umfasst kostenlosen Ersatz oder kostenlose Reparatur von unbrauchbaren oder nicht leistungsfähigen Teilen, denen ein durch den Verkäufer oder durch einer von diesem beauftragten Person ein nachgewiesener und anerkannter Herstellungsfehler zugrunde liegt. Der Garantieanspruch verfällt, wenn das Gerät nicht gemäß den vorliegenden Bedingungen oder den Anweisungen des Herstellers entsprechend benutzt wurde oder außerhalb der Kundendienst-Werkstatt des Herstellers modifiziert, repariert oder auch teilweise demontiert wurde.

Kaufdatum: .....

.....  
Verkäufer / Stempel und Unterschrift

**DIE KAPSEL VOR BEENDIGUNG DES ZYKLUS NIE ERSETZEN  
NICHT DAS KLEBEETIKETT UNTER DEM GERÄTES ENTFERNEN**

Technische Eigenschaften:  
Stromversorgung: 220-240 V  
Netzfrequenz: 50 Hz  
Leistungsaufnahme: max. 15 W  
Der Diffusor im Einklang mit den europäischen Sicherheitsnormen  
Patentiertes System



[www.kontak.it](http://www.kontak.it)



# PROPOL

therapy



- P PROGRAMM** - Umschaltknopf Raumbedampfung oder Inhalationsmodus (Atemmaske)
- D DAUER** - Verbleibende Kapselzeit (122 Std. rückwärts)
- I IONISATOR**
- V VENTILATOR**
- S SIGNALTON GESICHT** - Sprachauswahl



### Umweltprogramm

Umwelthygiene völlig natürlich mit der Verbreitung der flüchtigen Anteile von Propolis. Wissenschaftliche Studien haben die Reduktion von Luftkeimen bis zu 71,3% in nur drei Tagen bei Anwendung gezeigt (Bilogis Italiani, 1996)




### Aerosol Mask Programm

Eine gesunde, effektive und einfache Weise sich um Ihr Wohlbefinden zu kümmern, nur atmen! 100% natürliche Prävention.

# Propol therapy

ist mit einer Multifunktionsastatur ausgestattet. Dies ermöglicht eine individuelle Verwendung. Den Diffusor auf eine ebene Fläche stellen, an Strom anschließen und drücken Sie dann 

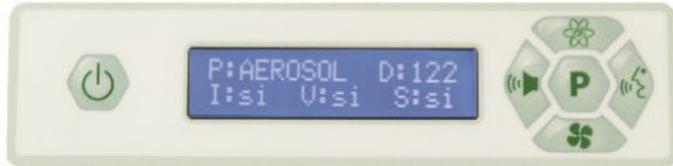

Wählen Sie das gewünschte Programm:

## P PROGRAMM ROOM = RAUMBEDAMPFUNG

Um die besten Ergebnisse bei der Prävention von Erkrankungen der Atemwege zu erhalten und für eine volle Umwelt-Hygiene, empfiehlt KONTAK die Verwendung des Diffusors 24 Stunden / 7 Tage die Woche. NUR in diesem Programm ist es möglich, die folgenden Funktionen aktivieren oder deaktivieren:

### IONISATOR (I)

Der Ionisator verbessert die desinfizierende Eigenschaften der Propolis. Durch den Prozess der Ionisierung, werden Propolismoleküle in der Luft freigesetzt und nehmen / ziehen mit negative elektrische Ladung besetzte Schwebeteilchen von entgegengesetzter Polarität, wie etwa Bakterien, Rauch, Viren und Staub auf. Die Luft ist somit frei von Schadstoffen und Verunreinigungen und die Atemwege können voll und ganz die Wirkstoffe der Propolis genießen. Das Deaktivieren ermöglicht die Verwendung des Diffusors bei Kindern unter 3 Jahren.

### VENTILATOR (V)

Der Diffusor ohne die Option „Lüfter“ bietet eine Deckung von bis zu 30 m<sup>2</sup> großen Räumen. Die Aktivierung des Lüfters erhöht sich die Deckung um das Doppelte und somit kann die Umgebungen bis zu 60 m<sup>2</sup> mit Propolis gesättigt werden

### TON / SIGNAL (S)

Deaktiviert den Klang und beseitigt den Signalton für den Benutzer am Ende der Einstellung und des Betriebszyklus der Kapsel.

## P PROGRAMM INHALATION MIT MASKE

Nach der Auswahl des AEROSOL MASKE Programmes warten bis die Zeit für die ideale Temperatur zum Schmelzen der Propolis erreicht wurde (5 Min.) Die Mindestzeit für eine Sitzung wird auf 15 Minuten empfohlen.

### Zubehör:

1 Kindermaske, 1 Erwachsenenmaske und 1 Maskenverbindungsschlauch.

## KAPSELWECHSEL

Jede Kapsel ist ein **Einwegartikel** und hat eine Lebensdauer von ca. 122 Stunden. Das Display zeigt den aktuellen Stand ihrer Nutzung (D). Das Ende des Zyklus der Kapsel wird durch einen Piepton angezeigt und zusätzlich durch die folgende Anzeige auf dem Display:

**KAPSEL ERSETZEN  
ZYKLUS NEUSTART**

Am Ende der Laufzeit der Kapsel ist es notwendig, das **Betriebssystem zurückzusetzen**. Das Verfahren ist wie folgt:

1. Schalten Sie den Diffusor aus
2. Drücken Sie die Taste  für etwa 15 Sekunden (Sie hören einen langen Dauerpiepton und dann einen Wechsel Piepton).
3. Entfernen Sie den Finger und ersetzen Sie die verbrauchte Kapsel mit einer neuen Kapsel um einen neuen Zyklus zu starten

Wenn der Zyklus abgeschlossen ist, wird dieser in der Kapsel sichtbar, ein Rest von verbrauchten Propolis ist zu sehen der keinerlei Wirkprinzip mehr entfalten kann.

**PROPOL** *verwendet ausschließlich Kapseln von KONTAK.*  
therapy



Display-Informationen sind in 5 Sprachen verfügbar:  
Italiano, English, Deutsch, Français und Español.

Erhältlich bei: [www.propolair.at](http://www.propolair.at)